



IT SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Movita BALANCE è una **bilancia impedenzometrica** che misura peso, massa magra, massa grassa, percentuale di liquidi, percentuale muscolare, ossea viscerale, oltre al BMI (Indice Massa Corporea) e BMR (Metabolismo Basale).


Movita BALANCE basa il suo funzionamento sulla analisi dell'**impedenza bioelettrica** del corpo umano. Dal momento che i tessuti magri conducono la corrente elettrica più dei tessuti grassi, a causa del maggiore contenuto di acqua ed elettroliti, ne consegue che la capacità di conduzione è direttamente proporzionale alla quantità di acqua ed elettroliti contenuti. Al contrario, la resistenza alla conduzione elettrica è direttamente proporzionale alla quantità di tessuto adiposo, visto che il grasso è un pessimo conduttore di corrente a causa del suo basso contenuto in acqua.

La superficie della bilancia è rivestita di un trattamento denominato ITO, ovvero una pellicola conduttiva trasparente (PCT), suddivisa in 4 quadranti (elettrodi), appositamente progettati per inviare un segnale sicuro a bassa intensità attraverso il corpo: in base all'impedenza bioelettrica, il dispositivo calcola la composizione del corpo umano.

Movita BALANCE grazie alla configurazione multiutente può essere utilizzata da tutta la famiglia.

MISURA E CALCOLA

- PESO
- BMI (Indice di massa corporea)
- BMR (Indice basale)
- Massa grassa
- Massa magra
- Percentuale liquidi
- Percentuale muscolare
- Percentuale ossea
- Percentuale viscerale

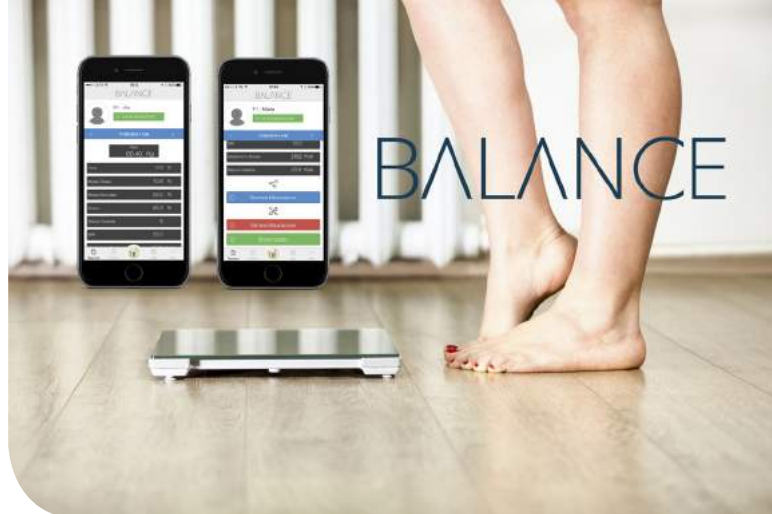

BALANCE

BALANCE



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **MOVITA BALANCE**
- BATTERIE (4 batterie tipo AA)
- MANUALE D'USO



REQUISITI AMBIENTALI DI UTILIZZO

- Per ottenere misurazioni accurate, posizionare la bilancia su una **superficie piana e rigida**.
- Condizioni di funzionamento: **da 10° a 40° C**.
- Umidità relativa: **da 20% a 90%**.

Movita BALANCE è progettata per funzionare anche in ambienti umidi. La formazione di eventuale condensa non danneggia la bilancia, tuttavia il dispositivo non va immerso in acqua né bagnato. Per evitare incidenti o di scivolare, asciugare la superficie della bilancia prima di salire.

AVVERTENZE

L'uso del prodotto è sconsigliato ai portatori di **pacemaker** o di altri dispositivi impiantabili e in gravidanza. Il prodotto non è adatto a **bambini** di età **inferiore ai 10 anni**. Consultare il medico, prima dell'uso. La superficie risulta **scivolosa** se bagnata.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

- 4 batterie standard AA da 1,5 V (incluse).
- Nessun cavo di alimentazione necessario.

MATERIALI

- Corpo in ABS rinforzato di grandi dimensioni.
- Superficie in vetro temprato, spessore 6mm, ad alta resistenza.

LIVELLI E INDICAZIONI DISPLAY

- Display LCD da 4.3" con retroilluminazione blu a LED
- Unità di misura: lb / kg / st
- Range di misura: da 5 a 180 kg
- Livelli di misura: 0.1 kg
- Precisione: +/- 0.5 kg
- Indicazione peso eccessivo
- Tecnologia di attivazione STEP-ON & TOUCH ON
- Auto spegnimento
- Indicazione livello batterie basso

SUPPORTO UTENTE E SINCRONIZZAZIONE

- Salvataggio dati fino a 10 utenti diversi.
- Comunicazione Bluetooth® fino a 10 metri di distanza
- Compatibile con dispositivi Apple® e Android®
- Sincronizzazione dei dati della bilancia con APP dedicata
- Possibilità di condivisione ed invio dei dati e delle statistiche

MODELLI DISPONIBILI


Esiste un **unico modello** di **Movita Balance**.

COLORI DISPONIBILI

Esistono **2 COLORI** diversi di bilancia:


- **BLU**
- **BIANCA**

PANORAMICA DEL PRODOTTO

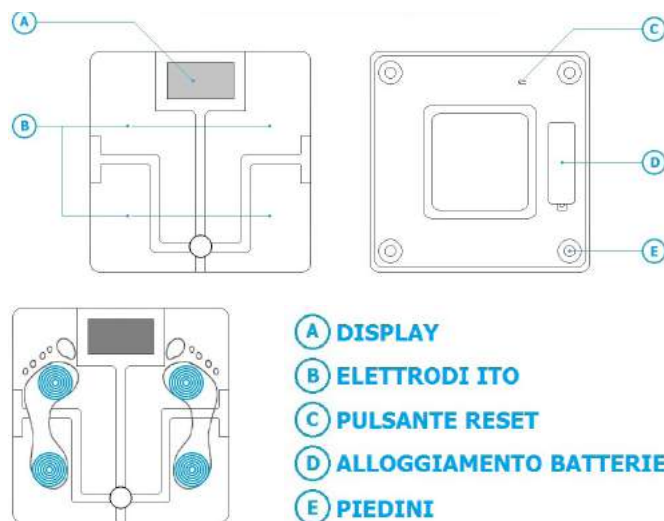

DIMENSIONI E PESI

MISURE	CORPO	PACKAGING
LARGHEZZA (cm)	32,5	39
ALTEZZA (cm)	32,5	39
SPESSORE (cm)	2,9	5
PESO (kg)	2,12	0,75

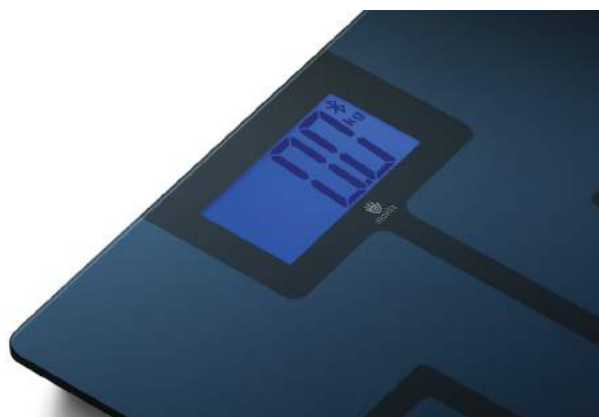

CODICE NATRIX: 16000000

MOVITA BALANCE - BLU

CODICE FARMADATI:



926817560



CODICE NATRIX: 16000100

MOVITA BALANCE - BIANCA

CODICE FARMADATI:



926817572



APPLICATIVI

Per utilizzare i dispositivi **Movita** avrai a disposizione le **App** scaricabili **gratuitamente**. I device senza l'apposita applicazione non possono essere sfruttati appieno, in quanto ci si precluderebbe svariate funzioni, **impostabili solo da smartphone e tablet**.

Inoltre senza le **App**, i dispositivi non possono interfacciarsi direttamente con la piattaforma **Telenutrizione** e **Telenutrizione Cloud**.

Per poter scaricare le App di **Movita** è necessario possedere dispositivi:

- **Apple® iPhone o iPad** con sistema operativo **iOS 7 o superiore**.
- **Android®** con sistema operativo **Android® 4.1 o superiore**.



iPhone and iPad are registered trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. Android is a trademark of Google Inc.